

## **ZEISS Progresiva Plus 2.**

Tan única como su graduación.



**Ver más. Vivir mejor.  
Lentes de precisión ZEISS.**





# Progresiva Plus 2.

Tan única como su graduación.



## ¿Qué diferencia a ZEISS Progresiva Plus 2 de ZEISS Progresiva Classic?

ZEISS Progresiva Plus 2 introduce en su diseño la Optimización en Tiempo Real avanzada calculando un diseño único al coordinar las graduaciones de los dos ojos, modificando el diseño final en función de ese cálculo antes de su fabricación. Como resultado, obtenemos una visión relajada en todo momento incluso en distancias intermedias y cercanas.


## ¿Cómo funciona?

Optimización en Tiempo Real avanzada. Un diseño único para cada usuario.

Tener en cuenta la graduación de cada usuario nos permite calcular un diseño único en Tiempo Real, antes de su fabricación.

El proceso comienza con la optimización del diseño global manteniendo una transición suave que, de otro modo resulta en imagen inestable y elevadas aberraciones tipo coma y trébol, protagonistas también de la falta de definición en condiciones nocturnas.

Por último, la zona intermedia y la posición del campo de cerca se calculan de acuerdo a los requisitos fisiológicos, longitud del pasillo y graduación del usuario.

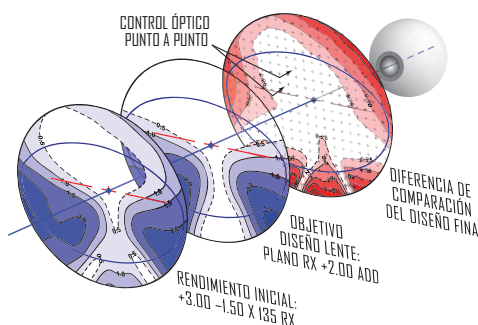

El rendimiento óptico inicial se compara con el rendimiento ideal optimizando punto a punto las desviaciones encontradas, es decir, las aberraciones introducidas por la propia graduación del usuario a todas las distancias frente a un diseño ideal\*.

La eliminación de estos errores y la interacción de ambos diseños, derecho e izquierdo, proporcionan una visión relajada durante todo el día.

A fin de garantizar el máximo rendimiento de ZEISS Progresiva Plus 2 le recomendamos la indicación de los datos de ambos ojos en sus pedidos incluso en reposiciones de una sola lente.

\*Diseño ideal: esf 0,00 Add 2,00 dp.

## Su cliente conseguirá...

- Una visión natural y relajada durante todo el día.
- Un diseño único como su graduación: adaptación sencilla y rápida.

## Su óptica conseguirá...

- Diseño de Tecnología Freeform avanzada con excelentes niveles de comodidad tanto para usuarios experimentados como principiantes.
- Lente progresiva de alto rendimiento en las zonas de mayor necesidad visual de su cliente: distancias intermedias y de cerca.

## ¿Sabía que un ojo relajado y libre de tensiones ve mejor?

Son muchos los factores que influyen en nuestro cansancio visual: estrés, la graduación correcta, tipo de lente, ordenadores, etc.

Si nos centramos en el tipo de lente, a través de la cual miramos, un factor principal que seguro conoce son las famosas aberraciones, es decir, pequeñas zonas borrosas en los laterales de la lente que nos provocan fatiga en los ojos y cuello.

ZEISS Progresiva Plus 2 elimina al máximo esas zonas menos claras gracias a que en su fabricación coordina en simultáneo la graduación de los dos ojos. De esta forma conseguimos una progresiva con campos de visión muy amplios que le proporcionarán una excelente comodidad en el uso diario.



Progresiva normal



ZEISS Progresiva Plus 2

## ZEISS Progresiva Plus 2 está disponible en 2 versiones:

- Plus 2 – altura mínima de montaje 18mm.
- Plus 2 Short – altura mínima de montaje 14mm.

