



## **ACCENTO vario de ZEISS**

Mejore la observación estereoscópica



We make it visible.

# ACCENTO vario de ZEISS

Como accesorio opcional para la lámpara de hendidura SL 130, el ACCENTO® vario de ZEISS reduce el ángulo estereoscópico para mejorar la observación binocular, por ejemplo, durante la observación periférica del fondo de ojo y en gonioscopias.




## Información clínica más amplia

Acoplado entre el objetivo frontal y el cambiador de aumento, el compacto ZEISS ACCENTO vario le permite reducir de forma conveniente el ángulo de observación estereoscópica de 12,5° a 7°. La reducción del ángulo aumenta el campo de visión binocular y amplía su información de diagnóstico.

## Funcionamiento sencillo

Con selección simple de ángulo e iconos autoexplicativos, el concepto operativo del ZEISS ACCENTO vario no puede ser más sencillo.

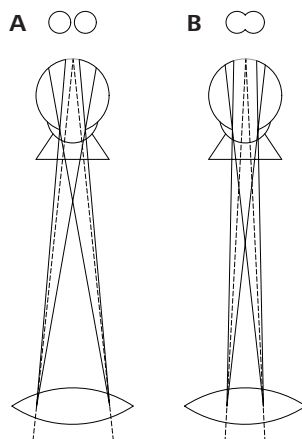

## Preinstalación o equipamiento posterior

El ZEISS ACCENTO vario está disponible para las nuevas lámparas de hendidura SL 130 directamente desde fábrica. También se puede equipar posteriormente en lámparas de hendidura SL 130 existentes. Póngase en contacto con uno de nuestros representantes de venta para obtener asistencia.

## Principio funcional

El ZEISS ACCENTO vario permite cambiar fácilmente entre dos ángulos de observación estereoscópica, de 12,5° a 7°, como se muestra en el diagrama. El ángulo más grande (A) es ideal para ver el segmento anterior del ojo con una apertura alta; y el ángulo más pequeño (B) para la observación binocular mejorada de la periferia del fondo de ojo o para visualización gonioscópica.



**Carl Zeiss Meditec AG**

Goeschwitzer Strasse 51–52

07745 Jena

Alemania

[www.meditec.zeiss.com/contacts](http://www.meditec.zeiss.com/contacts)

[www.meditec.zeiss.com/slitlamps](http://www.meditec.zeiss.com/slitlamps)

ES\_33\_022\_0021 Impreso en Alemania CZ-XII/2013

El contenido de esta hoja técnica puede diferir del estatus actual de homologación del producto en su país. Póngase en contacto con su representante local para obtener más información. Reservado el derecho a realizar modificaciones en el diseño o el volumen de suministro por desarrollos técnicos. ACCENTO es una marca comercial o marca comercial registrada de Carl Zeiss Meditec AG en Alemania y/o en otros países. © Carl Zeiss Meditec AG, 2013. Todos los derechos reservados.